


MPI ストーマベルト 取扱説明書

MPIベルトは、ストーマ装具の密着を向上させたり、ストーマ周囲ヘルニアの予防を目的とした固定用ベルトです。ご使用中の装具に合った補助板を組み合わせてください。

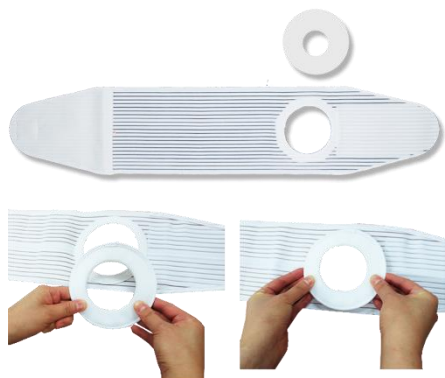

←MPI ストーマベルト補助板

←MPI ストーマベルト（本体）

装着する前に・・・
MPI ストーマベルトは、ベルトと補助板
のマジックテープ部分を合わせてから、
腹部に装着します。



装着方法

- ①ベルトと補助板のマジックテープ部分を合わせた後、補助板がお腹側にくるように当てます。
- ②補助板の孔からストーマ装具を通し、装具と孔の場所を整えます。
- ③しっかりとベルトを引っ張り、マジックテープを留めます。

※ストーマ周囲ヘルニアがある場合は、立位で軽くベルトを仮装着してから仰向けになり、腹部が平らになった状態で、再度しっかりとベルトを締めてください。



ご使用上の注意：ベルト装着部位の皮膚に異常が現れた場合は使用を中止してください。

お手入れ方法

MPI ストーマベルトは、マジックテープや固定用プレートが内蔵されていますので、洗濯は手洗いをしてください。

タンブラー乾燥（熱や風による短時間乾燥）はせず、自然乾燥してください。

漂白剤を使用すると、マジックテープ部分が黄ばむ場合があります。

材質 ◆ベルト：ポリエステル50.1%、ナイロン40.7%、ポリウレタン9.2%
◆補助板（肌側）：ネル（固定用プレート）塩化ビニル樹脂

製造・販売元 (株)エム・ピー・アイ

Tel：03-3451-0480 Fax：03-3455-2533

<https://www.mpi-store.com/>