
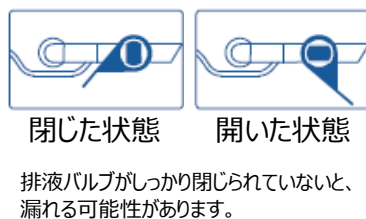



仕様変更品の特徴

GS1ラベルのロット末尾	末尾“A”
GS1ラベルの生産地記載	MADE IN CHINA
箱記載の弊社ロゴ	

1. 開封後、排液バルブが閉じていることを確認する。
イラストの通り、排液バルブのハンドルが排液チューブの
バッグ側に向いている状態

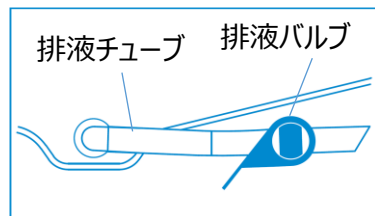


2. 導尿キャップ先端の
コネクターキャップを外し、
カテーテルに接続します。

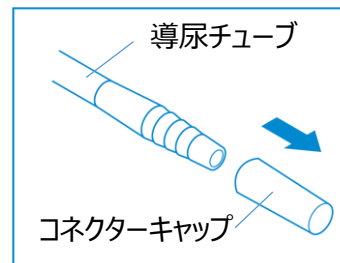


3. ハンガーバンド等でバッグ
を傾けないように設置します。

※尿が溜まると、バッグが少し揺むように感じるこ
とがございますが、使用上の問題はございません。

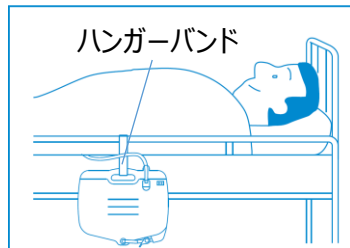

4. バッグから尿を排出するときは、
排液バルブのハンドルを排液チュー
ブ先端側に回し、排液する。

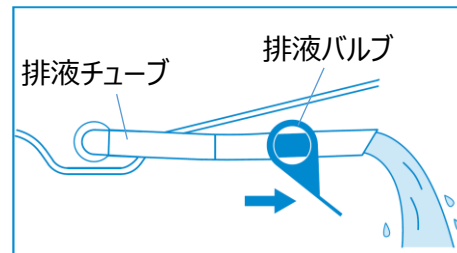

5. 新鮮尿採取方法
(新鮮尿採取口付品種のみ)

- ① 導尿チューブを鉗子で止めます。
② サンプル採取口を消毒し、**スリッパシリンジ**を挿入して吸引します。
(1回で必要な量を採取できないときは何度か繰り返してください)



注意

注射針を採取口に刺さないでください。
1回で必要な量を採取できないときは何度か
繰り返してください。
最初、スリッパシリンジを接続する際は固く感じ
ることがございますが、異常ではございません。

《使用上の注意》

注意

● バッグは、ベッドなどに傾けないように吊り下げ、かつ身体よりも
低い位置になるように取り付けてください。尿の逆流や尿流の停滞
が起こり、膀胱に損傷を与えるおそれがあります。
● 使用中は、導尿チューブが折れたりつぶれたりしていないことを確
認してください。過度な折れ曲がりや潰れは尿の流れを悪くします。
● 本製品は、EOG滅菌され、一回限りの仕様となっております。長
期にわたり使用する場合は、1週間を目安に新しい製品に交換して
ください。長期間の連続使用や洗浄、消毒、再滅菌しての再使用
はしないでください。

● バッグを横置ききの状態で使用しな
いでください。通気フィルターから尿が
漏れる可能性があります(右図)。
● 包装が破損、汚損している場合や製
品に破損等の異常が認められる場合
は使用しないでください。
● 包装を開封したらすぐに使用し、使
用後は感染防止に留意し、安全な方
法で処分してください。

横置き厳禁



《保管上の注意》

● 水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保存してください。

テルモ株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 4 4 番地 1 号

MANUFACTURED BY:

Terumo Medical Products (Hangzhou) Co. Ltd.
China

記載されている社名、各種名称は、テルモ株式会社
および各社の商標または登録商標です。

22GH128