

ヒーリフト・スムーズブーツ

取扱説明書

1. 安全上の注意


ご使用の際は、6～8時間毎にブーツを外して、虚血による変色がないか確認してください。

2. 製品概要

本品は、かかとにかかる体圧を軽減し、床ずれを防止するようにデザインされています。患者の足にぴったり合うよう装着でき、必要に応じて追加パッドを使用することもできます。

[標準セット]

ヒーリフト・スムーズブーツ（ボトムエレベーションパッド、固定ベルト含む） 1個
追加パッド 1個

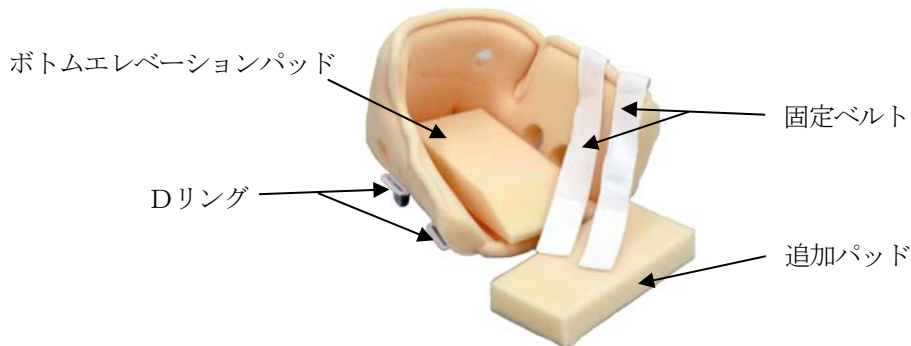

材質：ポリウレタン（ラテックスフリー）

注文コード	品番	商品名
030-104-01	10831727009987	ヒーリフト・スムーズブーツ


3. 使用方法

- 1) 固定ベルトを外し、開口部を広げます。その際、中に入っている追加パッドを取り出します。
※追加パッドは後で必要になるので保管しておいてください。



- 2) 患者の下肢をボトムエレベーションパッドの上に乗せ、かかとを浮かせます。
- 3) 固定ベルトをすねの上へまわしてDリングに下から通し、折り返してすねのところで固定します。固定ベルトが2本ともしっかり留められていることを確認してください。
※足の甲の部分で固定しないでください。
※締め付けすぎにならないよう注意してください。

- 4) 患者の足がブーツ本体内でフィットしているか確認してください。
 ※かかとのスペースとベッドの間に指が入ることを確認してください。

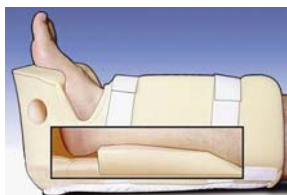

断面図



※感染防止のため、1患者に1個の使用をお奨めします。

【患者の足とブーツをフィットさせるための追加パッドの使用例】

付属の追加パッドは補助具としてご使用ください。追加パッドの片面は粘着面になっていますので、紙シートをはがすと本体に貼り付けることができます。

<p>1. 高さ・幅の調節</p> <p>かかとのスペースとベッドの間に指が入ることを確認してください。</p>	<p>2. 長い下腿</p> <p>追加パッドを体幹部方向にずらして貼り付けます。</p>	<p>3. アキレス腱</p> <p>アキレス腱のあたりに赤みが見られる場合、ボトムエレベーションパッドにV字型の切れ込みを入れます。追加パッドも使用する場合は同様に切り込みを入れ、ボトムエレベーションパッドの上に貼り付けます。</p>
		
<p>4. 回転しないようサポート</p> <p>追加パッドをブーツの外側に平行にあてがって貼り付けます。</p>	<p>5. 足底部をホールド</p> <p>追加パッドを足底部に沿うよう垂直にあてがって貼り付けます。</p>	<p>6. DVT ポンプ使用時</p> <p>DVT ポンプのチューブは必ずブーツの外に出してください。チューブを巻きこむと床ずれの原因になります。</p>
		

4. 洗浄方法

中性洗剤を使用してぬるま湯で手洗いをするか、アルコール等で湿らせた布で清拭してください。洗濯機、乾燥機をご使用の際は、固定ベルトをしっかりと締め、洗濯ネットに入れて洗浄してください。

5. 連絡先

村中医療器株式会社
 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号
 TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp>