

ESENTA™  
 ESENTA™  
 ESENTA™  
 ESENTA™  
 ESENTA™  
 ESENTA™

剥がしやすく、肌にやさしい。  
 快適で安心のストーマライフを。

# エセンタ™ 粘着剥離剤 スプレー 2本組セット キャンペーン



**2本組セットで10%OFF!**  
**数量限定! お早めに!**

※数量限定の2本組みセットキャンペーンにつき、完売次第終了となります。  
 キャンペーン終了後は通常価格となり、1本よりの販売となります。

日々のストーマ装具の交換をもっと簡単に、  
 もっと快適にするエセンタ™の特徴

サラっと、  
 すぐに剥がせる

あらゆる角度から  
 スプレーできる

無駄なく経済的



エセンタ™  
 粘着剥離剤 スプレー  
 2本組セット

入数	規格	注文番号	税込価格
2本	1本あたり50mL	423291	5,280円

1本あたり税込2,640円  
 2本あたり 税込価格

~~5,280円~~  
 (税込)

528円 (税込)  
 お得!

特別価格

**4,752円**  
 (税込)



時間をかけずに簡単にはがしたい…  
痛みなく、糊残りなく、きれいにはがしたい！  
そんなオストメイトの皆様へ、  
快適な生活をサポートします。

## エセンタ™ 粘着剥離剤 スプレー

**今なら 2本組10%OFF!**

### エセンタ™ 粘着剥離剤 スプレーの特徴


1 サラッと、  
すぐに  
はがせます

2 あらゆる  
角度から  
スプレー  
できる


3 的確な  
ピンポイント  
噴射で  
無駄なく  
経済的です

- 100%シリコン成分で、速乾性かつ皮膚上に蓄積しませんので、使用後にストーマ装具を貼付しても、粘着に影響を及ぼしません。
- ノンアルコールで、皮膚刺激性がありません。
- ノンオイルで、皮膚に残ったオイルを除去する手間が不要です。
- 無香料・無臭タイプです。
- あらゆる角度から噴射可能です。


### エセンタ™ 粘着剥離剤 スプレーの使用方法

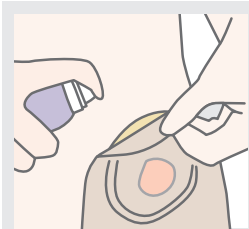

1 本品を粘着剤の  
周辺部に  
噴霧後、数秒間  
お待ちください。

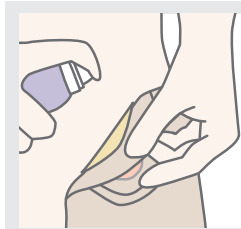

2 粘着剤を  
皮膚からゆっくり  
と剥がして  
ください。

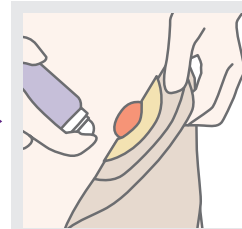

3 剥がれにくい  
場合、必要に  
応じて本品を  
さらに噴霧して  
ください。

**注意**

傷、湿疹等異常がある皮膚、粘膜など、繊細で敏感な部位（眼、口、耳、鼻、膣など）には使用しないでください。アレルギー反応の懸念がある場合は、使用前にパッチテストを行ってください。本品の使用により皮膚に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診察を受けてください。

糊残りの拭き取りには…

## エセンタ™ 粘着剥離剤 ワイプ



皮膚に残った糊残りを、更にしっかり落とします。  
携帯にも便利なアイテムとしてご使用ください。

エセンタ™ 粘着剥離剤 ワイプ（シリコンベース）

入数	注文番号	税込価格
30枚	423281	3,564円

※「エセンタ™ 粘着剥離剤 ワイプ」はキャンペーン対象外です。



さっと拭くだけ、  
糊残りを除去

シートを広げて、速やかに皮膚に残った糊（粘着剤）をシートでやさしく取り除いてください。使用後は皮膚を石けんとぬるま湯で清潔にしてください。

**注意**

傷、湿疹など異常がある皮膚、粘膜など繊細で敏感な部位（眼、口、耳、鼻、膣など）には使用しないでください。また、アレルギーのある場合はパッチテストを行ってください。本品の使用により皮膚に炎症などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診断を受けてください。

※お問い合わせの際は、必ず「エセンタ™ 粘着剥離剤スプレー 2本組セットキャンペーンチラシを見た」とお伝えください。

※掲載製品は、給付券対象外になる場合がありますので、お住まいの自治体にご確認ください。

販売店名

株式会社 エム・ピー・アイ

TEL 03-3451-0480

**MPI** Medical Products International